

facsimile foglietto illustrativo

1



Gel per cicatrici Formulazione innovativa

Kelo-cote® è un gel a base di siliconi, leggero e di facile asciugatura per il trattamento delle cicatrici. Kelocote asciuga rapidamente formando una pellicola gas permeabile, flessibile e impermeabile all'acqua. Kelocote aderisce allo strato corneo (lo strato più superficiale della pelle) formando una barriera protettiva che impedisce l'aggressione di agenti esterni (chimici, fisici e microbici) e ne permette l'idratazione. Di conseguenza si crea un ambiente favorevole che permette di mantenere un adeguato livello di umidità e ossigenazione che supporta i normali cicli di sintesi del collagene migliorando l'aspetto cosmetico della cicatrice stessa.

Kelo-cote® è in grado di ridurre, attenuare e rendere più lisce le cicatrici, alleviare l'arrossamento e la sensazione di prurito oltre che ridurre le alterazioni di colore associate alle cicatrici.

I gel di silicone sono utili nel trattamento delle cicatrici abnormi di tipo ipertrofico e cheloide. Può essere impiegato come primo prodotto di cura nel trattamento iniziale delle cicatrici e nella prevenzione delle cicatrici ipertrofiche e cheloidi.**

Kelo-cote® può essere applicato su articolazioni, parti del corpo sollecitate dal movimento, zone con presenza di peli e su cicatrici di grandi dimensioni come quelle causate da ustioni o da gravi traumi.

Kelo-cote® può essere utilizzato associato a indumenti compressivi o ad altri trattamenti per cicatrici.

Utilizzo:

Kelo-cote® è un trattamento per cicatrici ipertrofiche e cheloidi, recenti o non, conseguenti ad interventi chirurgici, traumi, ferite e ustioni.

Kelo-cote® è adatto all'uso su bambini e persone con pelli sensibili.

Istruzioni per l'uso:

- Controllare che la zona interessata sia pulita e asciutta.
- Applicare un sottile strato di **Kelo-cote®** sulla zona interessata e lasciare asciugare.
- Applicare **Kelo-cote®** due volte al giorno.
- Per un buon risultato, **Kelo-cote®** Gel deve rimanere a contatto della pelle per 24 ore.
- Una volta asciutto, **Kelo-cote®** può essere abbinato a indumenti compressivi, prodotti solari a protezione totale o cosmetici.

Se **Kelo-cote®** non si è asciugato nel giro di 4-5 minuti, significa che è stato applicato in quantità eccessiva. Rimuovere il prodotto in eccesso e lasciare asciugare.

La durata minima consigliata del trattamento è 60-90 giorni. Le cicatrici di vecchia data e di grandi dimensioni potrebbero richiedere un trattamento prolungato. Si consiglia l'uso continuato del prodotto qualora il miglioramento sia visibile anche dopo i primi 90 giorni di trattamento.

Asciugatura:

Il processo di asciugatura di **Kelo-cote®** è favorito dalla differenza di temperatura tra il gel e la pelle. Per ridurre i tempi di asciugatura nei climi caldi, conservare **Kelo-cote®** in frigorifero. In climi freddi, usare un asciugacapelli alla bassa velocità per ridurre i tempi di asciugatura.

Precauzioni d'uso:

Evitare il contatto diretto con occhi, mucose, ustioni di terzo grado e ferite aperte. Non utilizzare **Kelo-cote®** in presenza di patologie dermatologiche che alterano l'integrità della pelle. **Kelo-cote®** può macchiare gli indumenti se non completamente asciutto.

Solo per uso esterno. In caso di irritazione, interrompere l'uso del prodotto e consultare il medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza (EXP) indicata sulla confezione.

Ingredienti: Polissilossani, Biossido di Silicio

Contenuto: 6g, 15g & 60g

www.kelocote.it

Fabbricante:

 Rappresentante Autorizzato del Dispositivo Alliance Pharma S.r.l. Viale Restelli 5, 20124 Milano, Italy Advanced Bio-Technologies, Inc, 4830 West Kennedy Blvd, Suite 600, Tampa, Florida 33609, USA

Brevetto statunitense 5,741,509

Brevetto Eur. N. 1439866, 1409034

*Mustoe TA et al. Plast Reconstructive Surg 2002; 110:560-71

